

1. Rabattez les rabats d'extension sous le matelas standard afin d'assurer la stabilisation.
2. Brancher le cordon d'alimentation électrique (bas de la pompe).
3. Brancher les tuyaux à air du matelas à la pompe
4. Mettre en marche, Appuyer sur l'interrupteur O/I (côté gauche de la pompe)
5. Ajuster le poids du patient à l'aide de la roulette.
6. Installer la literie.

Panneau de façade



1- RÉGLAGES DE LA PRESSION:

- Pour régler la pression selon le poids (lbs) du patient, sélectionner le poids du patient en utilisant la roulette d'ajustement sur la façade de la pompe.

1- ON/OFF:

Ce bouton permet d'activer/désactiver la pompe.

2- MODE TRANSPORT ou PANNE ÉLECTRIQUE:

Ne pas retirer les tuyaux d'air de la pompe.

3. GUIDE DE DÉPANNAGE

Situation	Cause Possible	Solution
Perte de pression	<ol style="list-style-type: none">1. Connecteur mal branché ou tubes coincés2. Fuite dans le système	Vérifier: <ul style="list-style-type: none">• S'assurer que tous les raccords de tuyaux le long du matelas sont bien en place.• Contacter le service technique
Problème d'alimentation	<ol style="list-style-type: none">1. Une panne électrique est survenue2. Le câble d'alimentation est débranché	Vérifier: <ul style="list-style-type: none">• Rebrancher la pompe à l'alimentation

4- ENTRETIEN

Désinfection régulière selon votre protocole (pas de phénol).