



Silgen Ag est un spray antimicrobien innovant à base d'argent colloïdal conçu pour prévenir et traiter les infections dans tous les types de plaies chroniques, brûlures et plaies chirurgicales.

Sa formule en spray permet une application précise et uniforme sur toute la surface de la plaie, offrant une solution antimicrobienne efficace et rentable qui s'utilise avec n'importe quel pansement secondaire.

Caractéristiques principales

- Spray unique à l'argent fabriqué à partir d'argent colloïdal en suspension dans de l'eau oxygénée (2H₂O).
- Contient plus de 30 ppm d'argent.
- Sans odeur, sans décoloration de la blessure (tâches), sans picotement.
- Disponible en formats : 5 ml, 10 ml, 25 ml, 100 ml.
- Chaque «pompage» dispense environ 0,15 ml de substance.
- Deux pulvérisations suffisantes pour couvrir une blessure de 7x7 cm.
- Options de traitement complet :
 - Toutes les blessures chroniques (ulcères des jambes/ulcères du pied diabétique/ulcères de pression).
 - Plaies chirurgicales avant la fermeture.
 - Sites de greffe avant d'implanter le greffon.
 - Blessures post-opératoires à risque d'infection.
 - Blessures de traumatisme - formes particulièrement irrégulières (3D).
 - Brûlures (1er et 2e degré).
 - Peut être utilisé comme nettoyant de blessure ou comme traitement sous pansement.
 - Liberté et flexibilité exceptionnelles sans besoin de pansement spécifique imprégné d'argent.

Description

UTILISATION SÉCURISÉE

- Efficace en 30 min avec réduction logarithmique 4 dans la charge bactérienne en 4 h.
- Actif contre 7 organismes testés couramment trouvés dans les blessures.
- Réduction logarithmique 4 contre 6 bactéries communes et plus de 3 contre la levure dans les 24 h.
- Activité variable contre tous les organismes après 5 min.
- Dispense les particules d'argent dans toutes les parties de la blessure, empêchant les bactéries de se cacher.
- Contre-indications claires : allergie à l'argent confirmée, mères allaitantes, avant examens IRM.
- Précautions spécifiques pour nourrissons prématurés et femmes enceintes.

OPÉRATIONS CONVIVIALE POUR LES CLINIENS

- Présentation sous forme de spray - l'argent ne doit plus faire partie d'un pansement.
- Contrôle de la distribution de l'argent - garantit la couverture de toutes les parties de la blessure.
- Application simple : tenir le flacon à environ 5 cm de la blessure.
- Laisser agir pendant 1-2 min pour absorption dans le lit de la blessure.
- Répéter la procédure d'application à l'occasion de chaque changement de pansement.
- Peut être pulvérisé sur la peau environnante et les lignes de suture ouvertes.
- Nouvelle méthode très rentable : pansement non-médicamenteux (100) + Silgen Ag = 120 vs pansement à l'argent traditionnel = 200-230.

