
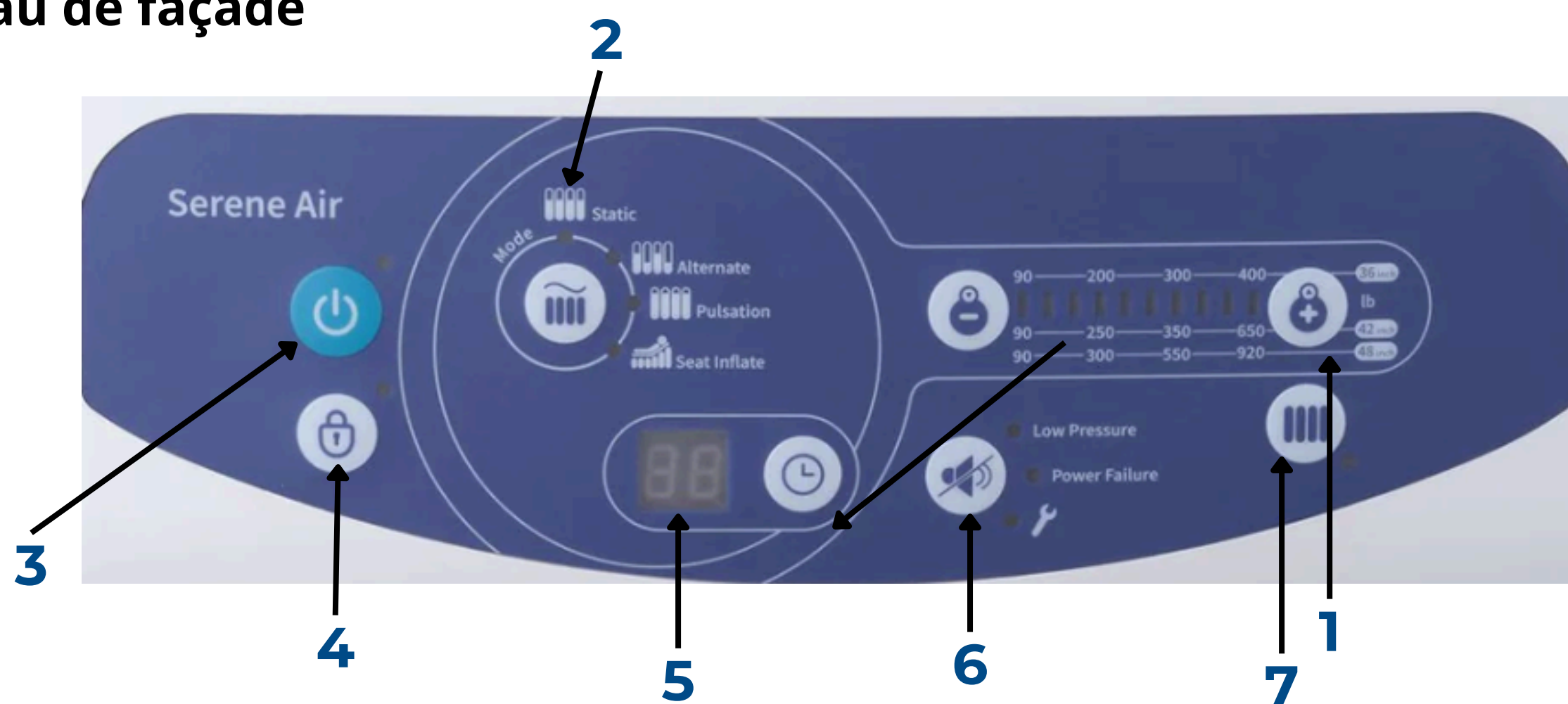


1. Fixer le matelas sur la partie mobile (non à la base) du lit à l'aide des cordons appropriés.
2. Brancher le cordon d'alimentation électrique (côté droite de la pompe).
3. Brancher le raccord rapide du tuyau à air du matelas à la pompe de tubes du matelas à la pompe :
 - S'assurer que le connecteur est bien dans la bonne position.
 - Raccordement du bas vers le haut, vous entendrez un "clic".
4. Mettre en marche, Appuyer sur l'interrupteur O/I (côté droite de la pompe) et appuyer le bouton du panneau de contrôle pour démarrer la pompe.
5. Le mode Max Firm s'exécute automatiquement pour la période de gonflement (environ 20 minutes).
6. Installer la literie.

Panneau de façade

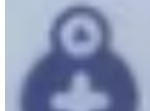

1- Réglages de la pression:

- Pour régler la pression selon le poids (Kg) du patient, appuyer sur le bouton  pour augmenter le niveau sur l'échelle allant de 40 à 200 kg.

- Pour diminuer la fermeté des cellules, appuyer sur le bouton 

2- Therapy:



- **Static:** Le mode statique offre une basse pression de contact continu.
- **Alternate :** Le mode d'alternance permet ainsi de modifier en continu les points de pression, pour un soulagement optimal de la pression.
- **Pulsation:** Ce mode permet d'augmenter et de diminuer la pression dans toutes les cellules toutes les 15 secondes.
- **Seat Inflate :** Ce mode offre un support additionnel dans le cas où le patient est amené à rester en position assise. Il peut être combiné avec le mode d'alternance ou le mode statique.

3- On/Off:

Ce bouton permet d'activer/désactiver la pompe.

REMARQUE : L'interrupteur de marche/arrêt sur le côté de la pompe doit être en fonction.

4- Lock

Ce dispositif de verrouillage empêche toute modification accidentelle du réglage de la pompe. Lorsqu'il est activé, le voyant lumineux vert s'allume. Pour activer ou désactiver ce dispositif, appuyer sur ce bouton pendant 3 secondes. Ce dispositif se réactive automatiquement 5 minutes après avoir été désactivé.

5- Cycle Time:

Quatre cycles sont disponibles. 5, 10, 15 et 20 minutes. En appuyant sur la touche "cycle time", on peut sélectionner l'un des quatre cycles.

6- Alarm Mute:

Bouton de neutralisation de l'alarme sonore. Lorsqu'il est activé, il suspend momentanément l'alarme, si la situation n'est pas résolue dans les 3 minutes qui suivent, l'alarme se réactivera.

- **Low Pressure :** Le voyant Basse Pression s'allume lorsque la pompe détecte une pression insuffisante à l'intérieur du matelas. Cette condition déclenche également une alarme sonore. Cette situation se produit lorsque la pression est insuffisante pour offrir le support nécessaire au patient. Ce voyant s'éteint lorsque la pression est rétablie.

- **Power Failure** : En cas de panne d'électricité ou lorsque le cordon d'alimentation électrique est débranché et à la fermeture de l'interrupteur de l'appareil, le voyant s'allume et une alarme sonore s'active. Appuyer sur le bouton de désactivation d'alarme.
- **Service** : Le voyant lumineux s'allume lorsqu'il y a défaillance interne de la pompe. Contacter le service technique.

7- Max Firm:

Ce mode s'exécute automatiquement lors de l'activation de la pompe pour environ 20 minutes, il permet de gonfler les cellules à leur pression maximum. Ainsi gonflées, elles constituent une surface ferme et stable facilitant les protocoles de soins et/ou la mobilisation du patient.

8- RÉANIMATION CARDIAQUE

Pour procéder au RCR ("CPR"), appuyer sur la touche de déblocage du Connecteur Rapide afin de détacher rapidement le connecteur de la pompe et pour évacuer l'air.

9- MODE TRANSPORT ou PANNE ÉLECTRIQUE

Ne pas retirer le Connecteur Rapide de la pompe.

10- GUIDE DE DÉPANNAGE

GUIDE DE DÉPANNAGE

Situation	Cause Possible	Solution
Low pressure (voyant et alarme)	<ol style="list-style-type: none">1. Connecteur mal branché ou tubes coincés2. Fuite dans le système	Vérifier: <ul style="list-style-type: none">• S'assurer que tous les raccords de tuyaux le long du matelas sont bien en place.• Contacter le service technique
Power failure	<ol style="list-style-type: none">1. Une panne électrique est survenue2. Le câble d'alimentation est débranché	Vérifier: <ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur le bouton Alarme Mute
Service (voyant)	Défaillance interne de la pompe	<ul style="list-style-type: none">• Contacter le service technique

ENTRETIEN

Désinfection régulière selon votre protocole (pas de phénol).