



Le système de prévention des chutes LEIKA est un moniteur de sécurité pour patients à cordon et message vocal, conçu pour détecter les mouvements des résidents et alerter le personnel soignant en temps réel. Compatible à la fois avec les configurations à cordon magnétique et à coussin capteur, il associe une technologie d'alarme fiable à une fonction de message vocal personnalisé pour une expérience patient plus rassurante.

L'appareil est doté d'un système audio personnalisable qui permet d'utiliser la voix familière d'un soignant ou d'un membre de la famille pour rassurer le patient et lui indiquer que les secours sont en route. Une réinitialisation automatique, la compatibilité avec les systèmes d'appel infirmière et un boîtier robuste le rendent idéal pour les milieux de soins de courte durée, de soins de longue durée et de réadaptation.

Caractéristiques principales

- Compatible avec cordon magnétique ou coussin capteur
- Alarme déclenchée par le mouvement : retrait (du patient) ou détachement de l'aimant
- Enregistrement de message vocal personnalisable (jusqu'à 10 secondes)
- Compatible avec les systèmes d'appel infirmière
- Réinitialisation automatique
- Temporisation (ou délai d'activation) : pour réduire les fausses alertes lors de mouvements brefs
- Fonction PAUSE (HOLD) : fenêtre de repositionnement de 300 secondes
- 8 tonalités d'alarme au choix + 8 mélodies pour l'identification de la chambre ou du soignant
- 3 modes de diffusion de l'alarme : tonalité seule, message vocal seul, ou message vocal puis tonalité
- Indicateur de batterie faible avec alertes visuelle et sonore
- Notification de perte de contact du capteur (ou déconnexion du capteur)
- Sans interrupteur marche/arrêt, toujours prêt à l'emploi
- Système anti-traction protégeant les coussins capteurs contre les dommages
- Boîtier en plastique épais et robuste
- Fonctionne avec une pile 9V ou un adaptateur secteur optionnel
- 3 réglages de volume : Silencieux, 90 dB (Faible), 108 dB (Élevé) à 30 cm
- Fixation possible sur fauteuil roulant ou lit
- Sans latex

Description

INDICATEURS D'ALARME

- **ALM** : Témoin rouge clignotant — alarme déclenchée
- **BATTERIE FAIBLE** : Témoin rouge clignotant + bip intermittent — batterie faible
- **MON** : Témoin vert clignotant — mode surveillance actif
- **MON (vert fixe)** : Témoin vert fixe — mode PAUSE actif

RÉGLAGES DES ALERTES SONORES

- 8 tonalités de bip et 8 mélodies disponibles
- Des tonalités distinctes permettent l'identification par chambre, par soignant ou par niveau de risque de chute
- 3 modes de diffusion : Tonalité seule / Message vocal seul / Message vocal puis tonalité



Description

MODES DE FONCTIONNEMENT

- **Mode Coussin (Pad Mode)** : Coussin capteur placé sur un lit, un fauteuil ou des toilettes. L'alarme se déclenche en cas de délestage (retrait du poids)
- **Mode Tapis (Floor Mode)** : Tapis capteur de sol. L'alarme se déclenche lors de l'application d'une pression (lorsque le patient pose le pied dessus)
- **Mode Aimant / Cordon (Magnet Mode)** : L'alarme se déclenche lorsque le cordon est détaché du boîtier

FONCTION PAUSE (HOLD)

- Maintenir le bouton PAUSE enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fenêtre de repositionnement de 300 secondes
- Appuyer de nouveau pour annuler la PAUSE et revenir au mode surveillance
- Désactivation automatique du mode PAUSE après 300 secondes

ENREGISTREMENT DE MESSAGE VOCAL

- Jusqu'à 10 secondes d'enregistrement vocal personnalisé
- Réenregistrable à tout moment
- Une voix familière rassure le patient tout en alertant le personnel

INTÉGRATION AU SYSTÈME D'APPEL INFIRMIÈRE

- Compatible avec les systèmes d'appel infirmière à contact continu et à impulsion (One Shot)
- Mode alarme silencieuse disponible pour réduire le bruit dans la chambre

ALIMENTATION

- Pile alcaline 9 V (6LR61)
- Adaptateur secteur CA optionnel

Autres informations

ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas immerger
- Éviter les produits de nettoyage caustiques
- Inspecter régulièrement tous les composants ; remplacer immédiatement les pièces usées
- Conserver dans la boîte d'origine, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

